

Дерматоскоп HEINE mini 3000



Инструкция пользователя



Данный прибор, как электронный, должен быть утилизирован отдельно, в соответствии с локальными требованиями.

Примечание:

Перед использованием приборов Heine mini 3000 внимательно прочитайте инструкцию и для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.

Область применения: Дерматоскоп HEINE используется только для клинического исследования поверхности кожи.

Требования безопасности: Используйте только источники питания, предназначенные для медицинских приборов.

Инструкции по использованию прибора

- Увлажните кожу дерматоскопическим маслом (используйте ватный тампон).
- Включите дерматоскоп и осторожно разместите его на коже так, чтобы исследуемая область находилась в центре контактной пластины (1a).
- Глаз исследователя должен находиться как можно ближе к окуляру (2).
- Свободной рукой настройте резкость изображения с помощью фокусирующего кольца (3). (В большинстве случаев требуется однократная настройка).
- Для проведения общего дерматологического исследования используйте дерматоскоп как лупу. Для этого уберите контактную пластину.

Контактная пластина (1a) прикреплена с помощью байонета. Чтобы снять пластину, поверните кольцо против часовой стрелки и отделите пластину от дерматоскопа. Вы можете установить маленькую контактную пластинку (1b) вместо пластинки (1a) для исследования недоступных повреждений – см. аксессуары. Чтобы снять ее, поднимите ее, не поворачивая. При замене пластинки, убедитесь, что световод (6) обращен к лампочке.

Замена лампочки

Примечание: правильная работа прибора гарантируется только при использовании фирменных ламп HEINE.

- Отсоедините дерматоскоп от рукоятки и вытащите старую лампочку (4).
- Протрите стекло новой лампочки мягкой тканью.
- Вставьте новую лампочку.

Штырек (5) должен располагаться в углублении соединителя.

Очистка и стерилизация

Снимите контактную пластинку (1a) и простерилизуйте или продезинфицируйте ее любым обычным методом, например в дезинфицирующем растворе, с помощью мытья, кипячения или автоклавирования. (до 134С в течении 5 мин.)

Кипячение, мытье и автоклавирование малой контактной пластины и дерматоскопа запрещено. Для очистки протрите их спиртом или дезинфицирующим веществом.

Технические данные

Увеличение ca. 10x

Диапазон фокусировки (коррекция) ca. ± 4 D

Контактная пластина и малая контактная пластина изготовлены из кремния с внутренним антиотражающим покрытием.

Аксессуары и запасные части

Галогенная лампа HEINE XHL 2,5 V	X-01.88.109
Контактная пластина без шкалы	D-00.78.116
То же, со шкалой	D-00.78.117
Малая контактная пластина	K-00.34.008
Дерматоскопическое масло (упаковка 6 шт.)	K-00.34.005